

**Nome Prodotto**

Posizionatore con Basetta in Espanso per Braccio.

Codice	Misure (cm)
05.00.AP419	70 x 20 x 8
05.00.AP420	30 x 15 x 10
05.00.AP421	50 x 15 x 10
05.00.AP422	60 x 15 x 10

Categoria

Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

Descrizione

Il POSIZIONATORE CON BASETTA PER BRACCIO protegge e stabilizza gli arti superiori durante gli interventi chirurgici.

MaterialiIl POSIZIONATORE CON BASETTA PER BRACCIO è realizzato in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm³ rivestito da un film di poliuretano. La base è in espanso ricoperta da uno strato di gel.**Manutenzione e Pulizia**

- I posizionatori in gel possono essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

Conservazione e Smaltimento

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 5° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 Pezzo.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

Codice CND


Y033399

Codice RDM

90736/R

Classe Dispositivo Medico

I conforme alla Direttiva MDR 2017/745

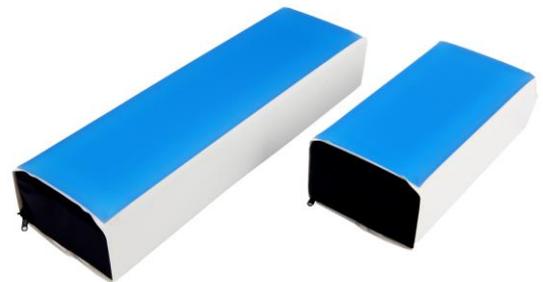

Product Name
Armboard with Base.



Code	Dimensions (cm)
05.00.AP419	70 x 20 x 8
05.00.AP420	30 x 15 x 10
05.00.AP421	50 x 15 x 10
05.00.AP422	60 x 15 x 10

Category
Gel Positioner for Operating Table.

Description
It can be used as arm support during all types of surgery.

Materials
It is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm³. The base is made of foam.

Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

Package
1 Piece.

Warranty
24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

CND Code
Y033399

RDM Code
90736/R

Medical Device Class
I complies with Directive MDR 2017/745

